

Produkt- und Reinigungsinformation

- Unsere depot- Medikamentenbehälter sind aus stabilem ABS*, hitze- und kältebeständig für Temperaturen von -20 bis +50 Grad Celsius.
- Problemlose Lagerung im Kühlschrank
- Nicht geeignet sind unsere Behälter für die Reinigung in Industriespülmaschinen, da diese +50 Grad Celsius weit übersteigen.

Wir empfehlen:

- Wenn Sie Kunststoff reinigen, achten Sie immer darauf, dass Sie das Reinigungsmittel gründlich abwaschen, bevor Sie die Oberflächen mit einem weichen Tuch trocken wischen.
- Rückstände von Reinigern und Spülmitteln können den Kunststoff angreifen und die Oberfläche spröde und rau machen.
- Kunststoff sollte immer mit einem weichen Schwamm oder Tuch gereinigt werden, um Kratzer zu vermeiden.

*ABS= Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer

wodimed
GMBH



wodimed gmbh, Leutkircher Str. 50, 88316 Isny im Allgäu
kdservice@wodimed.de Fon: +497562 / 913500 Fax: +497562 / 913501